

Kit para blanqueamiento dental profesional

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35%

Instrucciones de uso

KIT PARA BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 35%

Contenido:

- 3 jeringas dobles 2 ml. Peróxido de hidrógeno 35%
- 3 Resinas protectora 1.2 g
- 3 pastas de pulido 1.2 g
- Accesorios para aplicación

En caso de intoxicación o de ingesta accidental, llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono: +34 91 562 04 20.

Contiene agua oxigenada, xilitol y aloe vera. Evitar el contacto con los ojos. Enjuagar inmediatamente si el producto entra en contacto con éstos y consultar al médico. No ingerir. Evitar el contacto con la piel. No utilizar en menores de 18 años. No aplicar a niños ni mujeres embarazadas. Nocivo por ingestión. Irrita la piel. Venta exclusiva a odontólogos. No se recomienda su uso en consumidores habituales de alcohol y tabaco.

Instrucciones:

1. Realice una higiene dental.
2. Examine los dientes y compruebe cual es el tono inicial del diente antes de la aplicación del tratamiento con la guía de color ordenada de la siguiente manera: B1, A1, B2, D2, A2, C1, C2, D3, A3, D4, B3, A3.5, B4, C3, A4, C4.
3. Tome registro fotográfico del tono inicial. 3. Coloque el retractor labial. Dé un pulido inicial con la pasta piedra pómez incluida en el kit para eliminar posibles impurezas. Nunca use pastas que contengan glicerina, gomas o aceites.
4. Seque la dentadura y la encía con aire comprimido y seguidamente aplique la protección en la encía cubriendo completamente todos los tejidos. Polimerizar la resina protectora. Precaución: La sobreexposición de la resina a la lámpara puede causar aumento de calor en la encía.

5. Aplique con la jeringa el producto en la cara vestibular con un grosor de capa de aproximadamente 2 mm.
6. SI USA LÁMPARA coloque la cabeza de lámpara a menos de 2cm de los labios. Ajuste el tiempo y deje actuar el producto durante 8 - 10 minutos.
7. SI NO USA LÁMPARA comience con un ciclo de 10 minutos y aplique la lámpara de polimerizar a unos 6-7 mm de la superficie del diente cambiando cada 3 segundos de diente hasta completar el ciclo de los 10 minutos.
8. Una vez concluido el primer ciclo retire el gel aspirando cuidadosamente diente a diente. Vuelva a aplicar el producto y a exponer a la luz. No es necesario retirar la resina protectora, ésta nos va a servir para todo el tratamiento.
9. Una vez realizado el segundo ciclo vuelva a aspirar el producto. Si aún no ha obtenido el resultado deseado, puede volver a realizar un tercer ciclo exactamente igual a los anteriores. Como máximo, realizar 3 ciclos de 10 minutos.
10. Enjuague y retire el protector gingival.
11. Para terminar dé un toque final aplicando una pasta de diamante.
12. Compruebe la nueva tonalidad del diente y tome registro fotográfico de nuevo para comparar con el tono inicial.
13. Evitar ingerir durante las 72 horas posteriores al tratamiento los siguientes alimentos: Tabaco, café, té, colas, vino tinto, mosto, alcachofa, remolacha, cerezas, fresas, moras, frambuesas, granadas, sandia, uvas negras, chocolate, cacao, zanahorias, brócoli, espinacas, tomate frito, tinta de calamar, guisos realizados con colorantes, cualquier alimento de fuerte coloración.
14. Se recomienda mantener durante una semana el tratamiento ambulatorio con Proclinic Expert Kit Casa.

Última fecha de revisión: 06/2018

Más información disponible en:

www.proclinic-products.com



DentalSur 2003 S.L.
Avda. Ortega y Gasset 152
29006 Málaga (España)